

Ajuste de la posición de la bandeja

1. Jale hacia abajo la perilla de liberación del pistón debajo del descansabrazos derecho de la silla (sentado) y empuje / tire de la bandeja a la posición deseada.
2. Asegúrese de que la bandeja se bloquee en su lugar.

#### Almacenamiento / extracción de la bandeja

1. Párese frente al sillón. Agarre el borde frontal de la bandeja con la mano.
2. Con la otra mano, jale hacia abajo la perilla de liberación del pistón ubicada debajo del descansabrazos izquierdo.
  - A. Almacenamiento de la bandeja: deslice la bandeja para separarla del sillón reclinable hasta que la varilla de alineación izquierda esté fuera del marco.
  - B. Levante la bandeja y gírela hacia arriba y hacia el brazo opuesto del sillón reclinable. La bandeja ahora está a 90 grados.
  - C. Inserte la varilla de alineación en el lado derecho del marco debajo del apoyabrazos derecho.

#### Advertencia

NO sostenga el borde superior de la bandeja mientras desliza la bandeja a la posición de almacenamiento; de lo contrario, podrían producirse lesiones.

PRECAUCIÓN (El punto de pellizco existe entre el borde superior de la bandeja y el apoyabrazos).

Mientras sostiene el borde frontal de la bandeja, presione la barra de alineación completamente en el marco hasta que encaje en su lugar.

QUITAR LA BANDEJA - Deslice la bandeja lejos del sillón reclinable hasta que ambas varillas de alineación estén fuera del marco.

#### Limpiar la tapicería

**NOTA:** Se puede usar una variedad de solventes para limpiar la tapicería del sillón reclinable. La siguiente lista debería ser útil:

1. Manchas de suciedad comunes: Limpie la tapicería con agua tibia y un detergente suave para eliminar la suciedad superficial.
2. Manchas de suciedad incrustadas: use un cepillo de cerdas suaves y un limpiador en polvo o un detergente similar.
3. Alquitrán, asfalto o creosota: Se mancharán y deben eliminarse lo antes posible. El área se puede limpiar con queroseno o nafta.
4. Chicle: raspe con cuidado. Elimine el resto con queroseno o nafta.
5. Pintura o pasta para zapatos: Retirar inmediatamente. Utilice un paño humedecido con queroseno, nafta o trementina.

#### PRECAUCIÓN

Cuando se usa queroseno o nafta, se debe tener cuidado. Mantener alejado del fuego y usar solo en un área bien ventilada.

Siga cuidadosamente las instrucciones de limpieza provistas con los productos de limpieza. NO use removedor de pintura ni ningún limpiador líquido para brochas.

Excremento: Retirar inmediatamente. Limpiar con una mezcla de agua y jabón.

**NOTA:** La capacidad de desgaste de su sillón se puede mejorar utilizando periódicamente una cera en pasta de calidad.



## SILLÓN REPOSET TIPO HEMODIÁLISIS CON CHAROLA DESMONTABLE CON RUEDAS DE 5", VINYL AZUL

R208190



**IMPORTANTE: LEA ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR SU SILLÓN RECLINABLE**



ReActivMxOficial

[www.reactiv.com.mx](http://www.reactiv.com.mx)

## MANUAL DE USO

1. Retire el conjunto del respaldo del sillón sin ensamblar y déjelo a un lado momentáneamente.
2. Deslice el ensamblaje trasero de 1 pieza en los tubos cuadrados del ensamblaje del marco inferior (B) de modo que los orificios del respaldo se alineen con los orificios ubicados en la abrazadera horizontal del ensamblaje del marco inferior (B).
3. Levante la barra de bloqueo del sillón reclinable (F) y ajuste la posición del conjunto del respaldo (C) hasta que el botón de liberación de bloqueo (G) se enganche en el enlace de la barra de bloqueo de la ranura central cuando la silla esté en la posición de almacenamiento.
4. Inserte los tornillos a través de los orificios de la abrazadera horizontal y apriete todos los tornillos con un desarmador.

**NOTA:** Asegúrese de que el tornillo superior en ambos lados del tubo cuadrado del ensamblaje posterior esté lo suficientemente seguro antes de usar el sillón reclinable.



### Instrucciones de operación

Asegúrese de que haya suficiente espacio para operar el sillón reclinable. Debe haber al menos 90 cm. de espacio libre entre la parte superior del respaldo del sillón reclinable y los objetos de alrededor; de lo contrario, podrían producirse daños al sillón reclinable y / o los objetos alrededor.

### Reclinar el sillón con la palanca de bloqueo de posición.

**NOTA:** La palanca de bloqueo de posición reclina la parte trasera y la bloquea en su posición. El Usuario no puede reclinar el sillón empujando los brazos cuando la palanca de bloqueo de posición está en uso. Consulte RECLINACIÓN DEL SILLÓN SIN USAR LA PALANCA DE BLOQUEO DE POSICIÓN en este manual.

### ADVERTENCIA

Asegúrese de que la palanca de bloqueo de posición esté en la posición bloqueada cuando ocupe el sillón reclinable; de lo contrario, el ocupante o la persona que se encuentre detrás del sillón reclinable podrían sufrir lesiones corporales.

**NOTA:** Los lados derecho e izquierdo están determinados por la posición sentada del Usuario.

1. Localice la perilla de liberación del pistón en el lado derecho del marco trasero.
2. Tire de la perilla hacia afuera y manténgala presionada.
3. Saque la palanca de bloqueo de posición.
4. Alinee una de las muescas de la palanca de bloqueo de posición con los pernos de los marcos interiores del asiento.
5. Para reajustar la posición de la palanca de bloqueo, realice lo siguiente:
  - A. Sujete la palanca de bloqueo de posición.
  - B. Tire hacia arriba para quitar la palanca de bloqueo de los pernos.
  - C. Ajuste la palanca de bloqueo a una posición diferente.
  - D. Asegure la palanca de bloqueo en su lugar enganchándola en las muescas de los pernos.

### Reclinar el sillón sin utilizar la palanca de bloqueo de posición

1. Localice la perilla de liberación del pistón en el ensamblaje posterior.
2. Tire de la perilla hacia afuera y manténgala presionada.
3. Empuje la palanca de bloqueo de posición hacia arriba contra el marco del conjunto trasero y suelte la perilla de liberación del pistón.

**NOTA:** La perilla mantendrá la palanca de bloqueo de posición en la posición de almacenaje evitando que se bloquee en los pernos del marco.

4. Mientras está sentado en el sillón reclinable, agarre los descansabrazos y, al mismo tiempo, incline el peso del cuerpo hacia atrás y empuje hacia adelante con los brazos.

**NOTA:** El conjunto del reposapiés se elevará automáticamente a medida que se reclina el sillón.

**NOTA:** No se debe exigir al ocupante que ejerza una fuerza excesiva para cambiar la posición del sillón reclinable. Si el sillón reclinable presenta dificultades, se puede activar la palanca de bloqueo de posición y se debe llamar a un asistente para que coloque la palanca de bloqueo de posición en la posición de almacenaje. Si el sillón reclinable aún presenta dificultades para reclinarsse, llame a un técnico calificado.

5. Un asistente puede reclinar fácilmente el sillón desde una posición de pie (al lado del sillón) simplemente agarrando el descansabrazos con una mano; empuje el mango acolchado con el otro y luego empuje hacia abajo el mango de empuje.

### Colocación del reposacabezas

1. Para colocar el reposacabezas, simplemente tome el reposacabezas y empújelo a la posición deseada.

### Bloquear / desbloquear las ruedas traseras

1. Empuje hacia abajo el mecanismo de bloqueo de las ruedas para activar los bloqueos de las ruedas.
2. Libere los bloqueos de las ruedas empujando el otro lado del mecanismo de bloqueo hacia abajo.

### Instalación de la bandeja

**NOTA:** Los lados derecho e izquierdo están determinados por la posición de sentado del Usuario.

1. Baje la perilla de liberación del pistón debajo del descansabrazos derecho del sillón reclinable.
2. Deslice la bandeja lejos del sillón hasta que la varilla de alineación superior esté fuera del marco.
3. Levante la bandeja y gírela hacia arriba y hacia el brazo opuesto del sillón reclinable.
4. Inserte la varilla de alineación en el marco del lado izquierdo debajo del descansabrazos.
5. Empuje las varillas de alineación completamente en el marco hasta que la bandeja encaje en su lugar.