

## SUBIR/BAJAR EL ELEVAPIERNAS

NOTA: Para este procedimiento, consulte la **Figura 10**.

**Elevar:** Simplemente levante el Elevapiernas verticalmente a la posición correcta que desee.

**Bajar:** Sostenga el Elevapiernas, presione la manija hacia la rueda trasera de la Silla de Ruedas al mismo tiempo, el reposapiés bajará automáticamente. Suelte la manija después de finalizar el ajuste.



## AJUSTAR LA ALTURA DEL ELEVAPIERNAS

NOTA: Para este procedimiento, consulte la **Figura 11**.

Hay tres opciones para la altura del cojín del Elevapiernas. Gire el cojín hasta la posición correcta, solo coloque el pivote en el orificio deseado.



## DISPOSITIVO DE AUTOBLOQUEO

NOTA: Para este procedimiento, consulte la **Figura 12**.

El bloqueo de las ruedas no es un freno; NO lo utilice para detener la Silla de Ruedas. El bloqueo de ruedas se utiliza para evitar que las Sillas de Ruedas se deslice.

Levante la manija de bloqueo de la rueda hasta que la rueda trasera no se pueda mover, coloque el autobloqueo en la posición de bloqueo y luego la Silla de Ruedas se autobloquee. Levante la manija de bloqueo de la rueda para liberar el bloqueo automático.



## ANTI-TIPPERS (RUEDAS ANTIVUELCO)

NOTA: Los dispositivos antivuelco deben mantener un espacio libre de 1-1/2 a 2 pulgadas entre la parte inferior de las ruedas antivuelco y el piso.

NOTA: Para este procedimiento, consulte la **Figura 13**.

Presione el perno para instalar o quitar o ajustar el antivuelco.



NOTA: Los dispositivos antivuelco DEBEN estar completamente acoplados y el perno sobresaliendo completamente del orificio de ajuste. Por favor revíselo antes de usarlo.

## RECLINACIÓN

NOTA: Para este procedimiento, consulte la **Figura 14**.

El resorte de gas controla la reclinación de la Silla de Ruedas.

Hay dos manijas de para controlar dos tipos de resortes de gas, el izquierdo es para el asiento y el derecho es para el respaldo.

Levante la manija de ajuste para hacer la reclinación, suelte la manija cuando haya alcanzado el ángulo correcto que desea.

Haga el mismo paso a la inversa para volver a su posición normal presionando el asiento hacia abajo al mismo tiempo. Suelte el mango después de cualquier ajuste.

El rango de ángulo entre el asiento y el piso es 0° -30° , y entre la espalda y el suelo es 90°-180°.



## MANTENIMIENTO

1. Guarde la Silla de Ruedas en un lugar seco fresco, evite sustancias químicas como aceites, ácidos, etc.
2. Mantenga limpio el cuerpo de la Silla de Ruedas; puede utilizar un limpiador natural para limpiarla.
3. Está estrictamente prohibido ducharse con esta Silla de Ruedas. Si llegara a mojarse, séquela a tiempo.
4. Debe comprobar con frecuencia la presión de aire de los neumáticos.
5. Los radios de las ruedas motrices deben ajustarse una vez al año.
6. Debe agregar dos o tres gotas de aceite de motor de alta calidad a las ruedas motrices y a las ruedas delanteras cada mes.
8. Para mantenerse seguro, debe comprobar con frecuencia la sensibilidad del freno y observar si el respaldo está en mal estado o no.

## MANTENIMIENTO

1. Guarde la Silla de Ruedas en un lugar seco fresco, evite sustancias químicas como aceites, ácidos, etc.
2. Mantenga limpio el cuerpo de la Silla de Ruedas; puede utilizar un limpiador natural para limpiarla.
3. Está estrictamente prohibido ducharse con esta Silla de Ruedas. Si llegara a mojarse, séquela a tiempo.
4. Debe comprobar con frecuencia la presión de aire de los neumáticos.
5. Los radios de las ruedas motrices deben ajustarse una vez al año.
6. Debe agregar dos o tres gotas de aceite de motor de alta calidad a las ruedas motrices y a las ruedas delanteras cada mes.
8. Para mantenerse seguro, debe comprobar con frecuencia la sensibilidad del freno y observar si el respaldo está en mal estado o no.

## CERTIFICADO DE GARANTÍA

Su Silla de Ruedas ReActiv está garantizada por 1 año a partir de la fecha de compra original. Esta Garantía\* cubre cualquier defecto de Fabricación y Funcionamiento, así como imperfecciones de Materiales y Mano de Obra.

La Fecha de Adquisición deberá ser demostrada mediante la Factura Original que corresponde a la Silla de Ruedas, expedida por ReActiv S. A. de C. V. o un Distribuidor Autorizado, en la cual se indique claramente el Modelo y Número de Serie de la misma.

\*Aplican Restricciones. Favor de consultar Nuestra Tabla de Garantía Limitada en nuestro sitio web: [www.reactiv.com.mx](http://www.reactiv.com.mx)

## SILLAS DE RUEDAS PCI Y PCA



NO opere el equipo sin antes leer y comprender este manual

## MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO



## ESTABILIDAD

Antes de usar CUALQUIER posición reclinada de esta Silla de Ruedas, asegúrese de que las ruedas traseras estén en la mejor posición para mantener la estabilidad de la Silla de Ruedas. La altura del asiento, el ángulo del asiento, el punto de giro del marco del asiento, el sistema de asiento, la posición de las ruedas, el tamaño y la posición de las ruedas traseras, así como la condición del Usuario, se relacionan directamente con la estabilidad de la silla de ruedas. Cualquier cambio o cualquier combinación anterior puede causar que la Silla de Ruedas pierda estabilidad. Estos ajustes DEBEN ser realizados por un Distribuidor Autorizado ReActiv o un técnico calificado.

Antes de usar la opción reclinable, asegúrese de que los conjuntos de ruedas antivuelco estén en el orificio de ajuste más bajo (el orificio de ajuste más cercano al suelo).


## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- 1). A menos que se indique lo contrario, todo servicio y ajuste debe realizarse mientras la Silla de Ruedas está desocupada.
- 2). SIEMPRE mantenga las manos y los dedos alejados de las piezas móviles para evitar lesiones.
- 3). NO intente subir o bajar una pendiente con agua, hielo o aceite.
- 4). NO lo opere en calles donde circulen autos o autopistas.
- 5). NO intente pasar por encima de bordillos u obstáculos. Hacerlo puede causar que su Silla de Ruedas se vuelque y le cause lesiones corporales o daños a la Silla de Ruedas.
- 6). NO intente alcanzar objetos si tiene que avanzar en el asiento.
- 7). NO intente alcanzar objetos si tiene que levantarlos del suelo agachándose entre las rodillas.
- 8). NO se incline sobre la parte superior del tapizado del respaldo para alcanzar objetos detrás de usted, ya que esto puede provocar que la Silla de Ruedas se vuelque.
- 9). NO cambie su peso ni su posición sentada hacia la dirección hacia la que se dirige, ya que la Silla de Ruedas podría volcarse.
- 10). NO intente detener una Silla de Ruedas en movimiento con los seguros de las ruedas. Los seguros de las ruedas no son frenos.
- 11). NO incline la Silla de Ruedas sin ayuda.
- 12). NO utilice escaleras mecánicas para mover una Silla de Ruedas entre pisos. Pueden producirse lesiones corporales graves.
- 13). NO intente levantar la Silla de Ruedas por ninguna pieza removible (desmontable). Levantarla mediante cualquier pieza removible (desmontable) de la Silla de Ruedas puede provocar lesiones al Usuario o daños a la Silla de Ruedas.
- 14). NO se pare sobre el armazón de la Silla de Ruedas.
- 15). NO utilice el reposapiés como plataforma. Al subir o bajar de la Silla de Ruedas, asegúrese de que los reposapiés estén en posición hacia arriba.

## DESPLEGAR Y PLEGAR LA SILLA DE RUEDAS

NOTA: Retire el asiento, el respaldo y la almohada antes de plegarla o desplegarla.

Figura 1

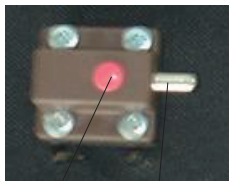

Botón Pasador

NOTA: Para este procedimiento, consulte la Figura 1.

Cuando lo separe, presione el botón, el pasador saldrá del marco de la silla, luego puedes quitar el asiento y de vuelta. Al instalar, asegúrese de que los pasadores estén bloqueados en el marco de la silla firmemente.

NOTA: Para este procedimiento, consulte la Figura 2.

Figura 2



Capucha Perilla de ajuste de altura

Cuando retire la almohada, presione la capucha, el soporte bajo de la almohada se puede tirar verticalmente desde el armazón de la silla. Cuando lo instale, coloque el soporte de la almohada en la silla, haga que la capucha quede bloqueada en el orificio de instalación. Para ajustar la altura de la almohada, opere el botón de ajuste de altura.

### Desplegar

Presione hacia abajo la barra de soporte verticalmente hasta que la silla de ruedas se despliegue completamente. Instale el asiento, el respaldo y la almohada, coloque los reposapiés en la posición de uso al final.


### Plegar

Gire los reposapiés hacia arriba hasta la posición vertical, retire el asiento, el respaldo y el almohada, levante la barra de soporte verticalmente y podrá plegar la Silla de Ruedas.

## INCLINACIÓN DEL USUARIO

NOTA: Para este procedimiento, consulte la Figura 3.

Figura 3

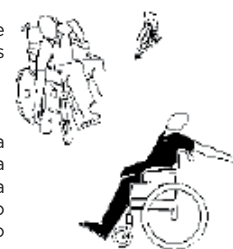

### Inclinarse hacia adelante

Coloque las ruedas delanteras de modo que queden lo más adelante posible y active los bloqueos de las ruedas.

### Inclinarse hacia atrás


Coloque la Silla de Ruedas lo más cerca posible de la posición deseada al objeto a alcanzar. Apunte las ruedas delanteras hacia adelante para crear el espacio más largo posible entre ejes. Llegue hacia atrás sólo hasta el brazo y extendiéndolo sin cambiar su posición sentada.

## INCLINACIÓN DE LA SILLA DE RUEDAS

### Levantar la Silla de Ruedas en aceras

NOTA: Para este procedimiento, consulte la Figura 4.

Figura 4

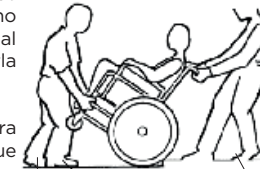

Segundo asistente Primer asistente

Al inclinar la Silla de Ruedas, se requieren dos asistentes. El segundo asistente debe ser colocado en la parte delantera de los elevapiernas y sujetarse de una parte no extraíble (no desmontable) del marco al levantar la Silla de Ruedas y estabilizarla cuando está siendo bajada al suelo.


El primer asistente debe pararse en la acera y levantar la Silla de Ruedas de modo que las ruedas traseras queden contra la acera. Gire los dispositivos antivuelco de modo que las ruedas antivuelco queden apuntando hacia arriba. La Silla de Ruedas debe estar inclinada hacia atrás en un punto de equilibrio y, en un movimiento continuo hacia arriba.

## Escaleras

NOTA: Para este procedimiento, consulte la Figura 5.

Figura 5

1. Retire los dispositivos antivuelco de la Silla de Ruedas.
2. Pasos similares con las sugerencias anteriores.
4. No se debe bajar la silla de ruedas hasta que el último escalón ha sido pasado y la Silla de Ruedas se ha alejado de la escalera.

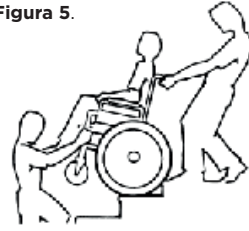

## PROTECCION DE BRAZOS

### Protección de Brazos

NOTA: Para este procedimiento, consulte la Figura 6.

Figura 6

Ajuste el perno para poder instalar o quitar el protector de brazos.

**Quitar:** Presione el pasador hacia arriba para poder retirar el perno y luego tire del protector del brazo hacia afuera del armazón de la silla.

**Instalación:** coloque la protección del brazo en el marco de la silla, luego instale el perno para fijar el protector del brazo.



Perno Pasador Protector de brazos

## TABLERO LATERAL


NOTA: Para este procedimiento, consulte la Figura 7.

Figura 7

El tablero lateral se utiliza para fijar la postura sentada de los Usuarios.

Opere la perilla de ajuste que puede instalar o retirar el reposabrazos y ajustar su altura.

Después de cualquier ajuste, asegúrese de que las perillas queden ajustadas.

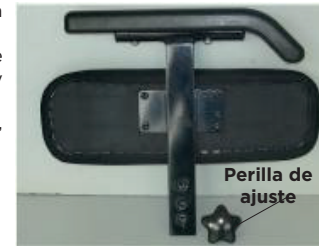

Perilla de ajuste

## PROTECTOR DE CUERPO

NOTA: Para este procedimiento, consulte la Figura 8.

Figura 8

La protección corporal se utiliza para evitar que el Usuario resbale por inercia en alguna emergencia de frenado.

Después de cualquier ajuste, asegúrese de que las perillas queden apretadas.



Perilla de ajuste Protector de cuerpo


## ELEVAPIERNAS DESMONTABLE

NOTA: Para este procedimiento, consulte la Figura 9.

Figura 9

**Quitar:** Desenrosque la manija de control, luego ponga el elevapiernas a un lado. Levante el elevapiernas hasta que el pasador esté fuera del pivote.

**Poner:** coloque el pasador en el pivote desde el lado, luego gire el elevapiernas hasta que quede asegurado con fuerza en el marco de la silla.

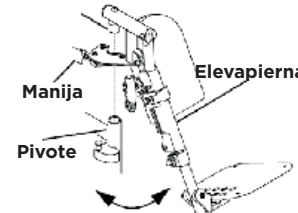

Manija Elevapiernas Pivote