

## Banco para Ducha ReActiv de Aluminio sin Respaldo Desarmable



Código: R211211

### Contenido:

Asiento

Tubos conectores (Patas)

Tornillos y Rondanas

1 pza

2 pzas

5 pzas.

**Revisar que el contenido de la caja este completo y en perfecto estado.**

### Instrucciones de Ensamble

- ① Una vez que haya retirado el Asiento del empaque, colóquelo sobre una superficie plana, volteando hacia arriba.
- ② Sobreponga el Asiento e inserte los Tubos de Soporte (Patas) en las ranuras, empezando por el número 1 y consecutivo el número 2, como se muestra en el Gráfico 2.
- ③ Ajuste la altura de su preferencia acomodando los botones.
- ④ Insertar los Tornillos en los Orificios correspondientes como se muestra en el Gráfico 3.

