

Banco para Ducha ReActiv de Aluminio con Respaldo Desarmable



Código: R211212

Contenido:

Asiento
Tubos Soporte
Tornillos y Rondanas
Respaldo

1 pza

4 pzas


9 pzas

1 pza

Revisar que el contenido de la caja este completo y en perfecto estado.

Instrucciones de Ensamble

- 1 Una vez que haya retirado el Asiento del empaque, colóquelo sobre una superficie plana, volteando hacia arriba.
- 2 Sobreponga el Asiento e inserte los Tubos de Soporte (Patatas) en las ranuras, empezando por el número 1 y consecutivo el número 2, como se muestra en el Gráfico 2.

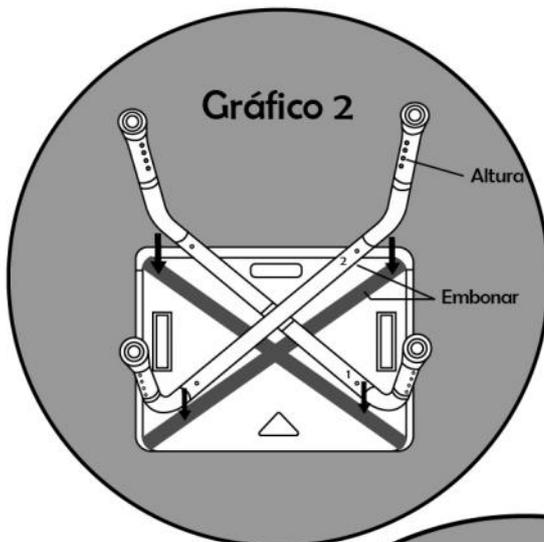

- 3 Inserte el Tornillo de en medio que une a los dos Tubos de Soporte, para que no se muevan de su sitio.
- 4 Ajuste la altura de su preferencia acomodando los botones.

Instrucciones de Ensamble de Respaldo

- 1 Sobreponga los Tubos en los orificios correspondientes por encima de los Tubos de Soporte (Patatas) como se muestra en el Gráfico 3.
- 2 Insterte los Tornitos cortos en la parte del Asiento y los largos en la parte de el Respaldo y apriete hasta que los Tubos no se muevan.

