

Silla Cómodo Ducha ReActiv de Aluminio con Ruedas Acojinado



Código: R213093

Contenido:

Chasis	1 pza.
Respaldo	1 pza.
Cubeta con Tapadera y Salpicadera	3 pzas.

Revisar que el contenido de la caja este completo y en perfecto estado.

Instrucciones de Ensamble de Respaldo

- ① Una vez que haya retirado el Chasis del empaque, coloquelo sobre una superficie plana.
- ② Sobreponga el Chasis e inserte los tubos conectores izquierdos y derechos del Respaldo.
- ③ Presione el botón de los tubos conectores y embone en el orificio del Chasis.

- ④ Ajuste la altura de su preferencia acomodando los botones.

Instrucciones de Ensamble de la Cubeta

- ① Inserte la Cubeta en los tubos que se encuentran de bajo de el asiento.

