




INSTRUCTIVO
DE INSTALACIÓN Y ENSAMBLE

INCREMENTOS
PARA BAÑO

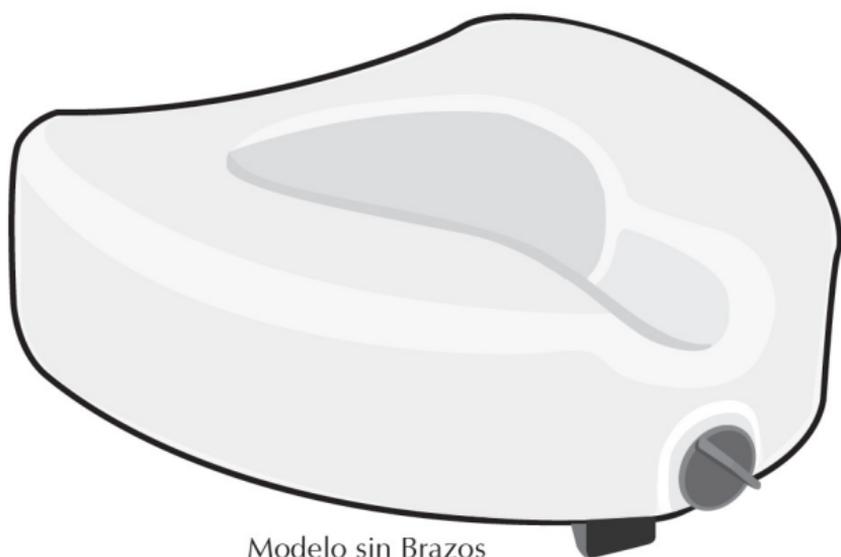

Modelo sin Brazos

*Diseñados ergonómicamente para
proveer al Usuario estabilidad y
confort, facilitando el sentado e
incorporación del W.C.*



Modelo con Brazos




Modelo con Brazos Abatibles

INSTRUCCIONES

DE INSTALACIÓN Y ENSAMBLE

Siga estos sencillos pasos para instalar su Incremento para Baño ReActiv en la taza del W.C.

- 1.** Ubique la abrazadera inferior de su Incremento, esta deberá quedar por dentro de la taza del W.C.

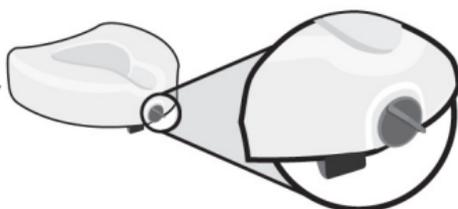

- 2.** Coloque su Incremento sobre la taza del W.C. (la abrazadera de su producto debe quedar en el interior del contenedor)



- 3.** Para comodidad de los Usuarios, su producto ReActiv no requiere de instalación especial o herramientas para su ensamble. Una vez que ha colocado el Incremento sobre el inodoro sólo ajuste la perilla y sujételo firmemente a la taza del W.C.




Usted ha instalado su Incremento para Baño correctamente

INCREMENTO DE LUJO CON BRAZOS FIJOS

Siga estos sencillos pasos para ensamblar su Incremento ReActiv con Brazos Fijos.

- A)** Para ensamblar los brazos fijos de su incremento sólo empújelos hacia abajo e insérteles de forma que coincidan con los orificios de los costados. Es importante que los brazos se inserten con la curva apuntando hacia afuera para tener mayor amplitud.

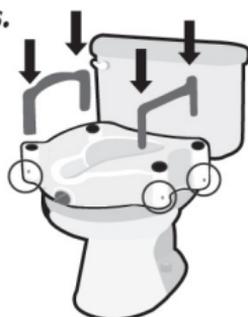


- B)** Una vez que estén dentro presione hacia abajo hasta escuchar un click.



INCREMENTO DE LUJO CON BRAZOS ABATIBLES

Siga estos sencillos pasos para ensamblar su Incremento ReActiv con Brazos Abatibles.

- A)** Inserte los tornillos provistos en el extremo inferior de los brazos abatibles y atorníllelos a su incremento.

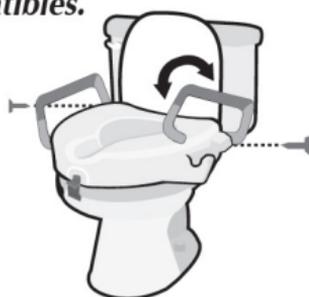

- B)** Con esta sencilla instalación usted puede abatir los brazos de su producto fácilmente.



En caso de requerir mayor información o tener dudas al respecto de este Instructivo, póngase en contacto con su Distribuidor Autorizado.

Gracias por elegir un Producto ReActiv

NOTA: Algunas de las instrucciones o ilustraciones incluidas en este Manual pueden no coincidir con el modelo original, sin embargo las características e indicaciones generales de este documento pueden aplicar para todos los Modelos.