



Plegoö 2Go
by PReActiv

ReActiv
ReActivando tu Salud!

Manual de usuario



Andadera Rollator Plegoö 2Go X8

DE ALUMINIO PLEGABLE

CON RUEDAS DELANTERAS 10" Y TRASERAS DE 8"

R223013/14

ÍNDICE

1.- Introducción	3
2.- Información General	3
3.- Resumen del producto y entrega.....	5
4.- Descripción general.....	6
5.- Ensamble	7
6.- Uso de la andadera	10
7.- Limpieza y desinfección	15
8.- Reutilización.....	16
9.- Reparación y mantenimiento.....	18
10.- Garantía.....	20

1. INTRODUCCIÓN

Muchas gracias por elegir nuestro producto, la calidad de la andadera no lo decepcionará.

Lea detenidamente este manual de usuario antes de utilizar la andadera por primera vez.

Contiene información de seguridad importante y consejos valiosos para el uso y mantenimiento adecuado de este producto. Si tiene preguntas o necesita información adicional, consulte a su Distribuidor Autorizado ReActiv.

2. INFORMACIÓN GENERAL

El manual de usuario lo ayudará a familiarizarse con la operación y el manejo de la andadera, asegúrese de leerlo completamente antes de utilizar el producto, en caso de entregar el producto a otra persona, también otórguele este manual para que este al tanto de su funcionamiento.

Función específica

Esta andadera está diseñada para espacios interiores y exteriores y exclusivamente para una persona. El manual de usuario va dirigido al usuario de la andadera.

Indicaciones

Este producto es para personas con movilidad limitada que aún tienen la capacidad, fuerza y estabilidad suficientes para poder salir de su residencia con el apoyo de cualquier andadera.

Contraindicaciones

El uso de la andadera no es adecuado para personas que:

- Tengan problemas de visión
- Tengan problemas de equilibrio
- No tengan extremidades superiores
- Sean incapaces de sentarse

Vida útil del producto

La vida útil esperada la andadera es de hasta 5 años, según su uso, el tipo de seguridad, cuidado y mantenimiento de acuerdo con las regulaciones que indican este manual. Más allá de este período de tiempo, la andadera todavía puede usarse, siempre y cuando las condiciones de la misma sean adecuadas.

Los símbolos



Información particular relacionada con la seguridad. El incumplimiento de estos puntos puede ocasionar lesiones o accidentes.



Información particularmente útil.

3. RESUMEN DEL PRODUCTO Y ENTREGA

Inspección de entrega

La andadera se entrega completamente ensamblada en una caja. Después de desempacar, conserve la caja y el material de empaque para una posible garantía. La caja se puede usar para el almacenamiento posterior del producto.

Inspeccione el contenido de la caja para verificar que esté completo y en buenas condiciones. En caso de daños, no utilice el producto y notifique a su Distribuidor Autorizado ReActiv.

Contenido al entregar

Consta de los siguientes componentes principales:

- 1 embalaje exterior
- Andadera, con respaldo y soporte de inclinación incluido
- Portaobjetos de malla con reflejante y cierre.
- 2 soportes laterales con carcasa interna
- Manual de instrucciones
- Lámpara LED

Opcional (incluye):

- Estuche grande
- Bandeja

Identificación

Cada andadera está equipada con una etiqueta. Esta se encuentra en el interior del marco izquierdo.

4. DESCRIPCIÓN GENERAL



-
- 1.-Respaldo
 - 2.-Bolsa portaobjetos
 - 3.-Montura de ruedas delanteras
 - 4.-Ruedas delanteras (orientables)
 - 5.-Ajuste del freno
 - 6.-Ruedas traseras
 - 7.-Soportes de inclinación (izquierda y derecha)
 - 8.-Montura de ruedas traseras
 - 9.-Iluminación
 - 10.-Superficie para sentarse
 - 11.-Ajuste de altura deslizable
 - 12.-Freno de mano
 - 13.-Manubrio deslizable

5. ENSAMBLE

Le recomendamos que ensamble la andadera junto con orientación de su Distribuidor Autorizado ReActiv. Con un conocimiento muy básico, también puede ser ensamblado este producto.



Tenga en cuenta el mayor riesgo al ensamblar puede suceder en el proceso de la instalación de las ruedas.

Altura del manubrio

Puede ajustar la altura del manubrio para que se adapte a su cuerpo. No se requiere de ninguna herramienta.

Puede encontrar un pestillo rojo (Figura 3) debajo de cada manubrio. apriete el pestillo y mientras lo tiene presionado puede subir o bajar

el soporte lateral, después suelte el botón. Tire o empuje una vez más hasta que escuche y note que el manubrio hace clic y ya no se puede ajustar. Repita el proceso en el otro lado hasta que ambos soportes estén a la misma altura.

Bolsa porta objetos

Esta andadera se entrega con una bolsa ensamblada. La bolsa simplemente se puede quitar o colgar sobre la percha.



figura 3



figura 4

Frenos

La configuración de los frenos se recomienda sea realizada por un especialista capacitado. Sin embargo, si tiene experiencia con andaderas o frenos de bicicleta, puede completar este trabajo usted mismo. Sin embargo, tenga en cuenta que los frenos instalados incorrectamente pueden ocasionar accidentes.

Aumento / disminución del efecto de freno

1. Afloje el tornillo Allen. (FLECHA 1 de figura 5)
2. Apriete o desapríete el cable Bowden tirando hacia afuera o hacia adentro. (FLECHA 2 de figura 5)

3. Vuelva a apretar el tornillo Allen.

Pequeños ajustes:

Afloje la tuerca de seguridad (FLECHA 1) para poder girar el tornillo de instalación. Gire el tornillo de instalación (FLECHA 2) en el sentido del reloj; el efecto del freno disminuye. Gire el tornillo de instalación en sentido contrario a las manijas del reloj; el efecto de freno aumenta.

Finalmente, vuelva a apretar la tuerca de seguridad.

Complete este paso nuevamente con el otro freno.

Ajuste los frenos para que cuando se mueva no vibre y sea fácil de operar. Con los frenos de mano activados no podrás mover la andadera.

figura 5

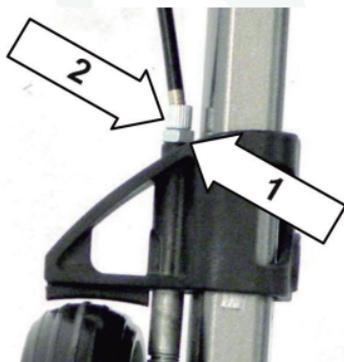
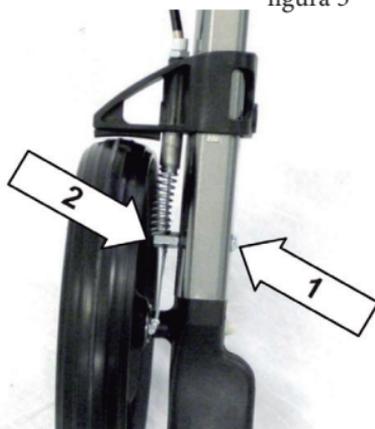


figura 6

6. USO DE LA ANDADERA

Ponga especial atención al plegar y desplegar, ya que este movimiento puede magullar objetos o partes del cuerpo.

Plegar y desplegar

La andadera tiene la capacidad de plegarse y ahorrar espacio en el momento de guardarla.

Para poder usarla, ábrala empujando el asiento desde los bordes exteriores. En la parte inferior de la andadera, encuentre el dispositivo de bloqueo para evitar un plegado involuntario.

Al abrir la andadera, se escucha un cierto clic, esta es una señal de que el bloqueo está activado correctamente.

Para plegar, jale el asa del asiento hacia arriba.



Transporte y almacenaje

Para poder transportar y almacenar la andadera para ahorrar espacio, es posible girar las ruedas delanteras hacia arriba y quitar el soporte de montaje de las ruedas traseras.

Ruedas delanteras

Presione el pestillo rojo para aflojar el bloqueo de las ruedas delanteras. Luego jale las ruedas delanteras hacia adelante y gire 180 ° hacia arriba.

Para volver a usar la andadera, jale la rueda delantera hacia adelante y gírela hacia abajo. Escuchará un clic al momento que toma su posición asegurada.

Ruedas traseras

Luego, doble la palanca hacia abajo. Finalmente, presione el botón y extraiga el conjunto de la rueda trasera hacia abajo. Tenga en cuenta que la rueda trasera siempre está conectada a la andadera por el cable del freno.



Para ensamblar, simplemente empuje el conjunto de la rueda trasera nuevamente dentro del marco, hasta que suene un clic y al finalizar doble la palanca hacia atrás.

Asegúrese de que la rueda trasera esté bien fijada y que los frenos funcionen correctamente.

Usando la andadera

Primero pruebe la andadera en una superficie plana y seca. Vaya acompañado por otra persona si es posible. Practique y después del primer intento, si se siente seguro úselo en superficies ligeramente inclinadas.



Preste atención cuando vaya con la andadera y mantenga sus manos cerca de los soportes laterales, de esta manera se puede reducir efectivamente el riesgo de caídas.

Usted determina la velocidad y la dirección con la fuerza que ejerza en la andadera. Use ambos frenos para disminuir la velocidad. Manténgase atento al momento de activar los frenos de lo contrario la andadera seguirá andando y podría caerse.

Antes de intentar superar obstáculos en su camino, busque una rampa; en vez de escaleras o toma el ascensor. Si esto no es posible debes de ser asistido por alguna persona para superar dicho obstáculo. Si es posible encuentra alguna persona para que te ayude.

Asistencia de inclinación

La andadera está equipada con dos asistentes antivuelco, los cuales suavizan el movimiento en curvas. También, sirven para apoyar el pie en ellos al mismo tiempo que eleva la andadera para evitar obstáculos pequeños que estén al frente, sin hacer tanto esfuerzo. Ponga mucha atención cuando haga esta maniobra y realícela con cuidado.



Frenos

La andadera está equipada con dos sistemas de operación de freno, el freno de mano convencional y el freno para estacionarse, de esta manera se previene cualquier posible accidente de rodar involuntariamente.

Para detener de manera fácil y segura la andadera, jale ambos frenos hacia arriba



El efecto del freno depende de qué tan fuerte se presionen los frenos. Use el freno de estacionamiento empujando las manijas del freno hacia abajo hasta que encajen en su lugar con un clic audible. Para aflojar el freno de estacionamiento, jale las manijas del freno hacia arriba.



Usar el asiento de la andadera

Su andadera está equipada con una superficie para sentarse y un respaldo. Antes de sentarse, debe poner el freno de estacionamiento. De lo contrario, la andadera podría rodar ocasionándole una caída. No use cojines de asiento adicionales; podría resbalar y caerse.



Iluminación

Conecte la iluminación con la pila suministrada al marco, para que tenga mayor visibilidad en la parte frontal. Presione el botón de encendido / apagado para activar la luz. Además, puede cambiarlo a diferentes modos de parpadeo.

Cargando la andadera

Si tiene obstáculos que no puede pasar con la andadera, pliéguela y cárguela por las empuñaduras, tenga cuidado al hacer esta maniobra para no magullarse alguna parte del cuerpo.

Información de seguridad

Antes de cada uso, debe examinar la andadera y buscar posibles daños, debe inspeccionar que los frenos estén funcionando correctamente.

La andadera no esta diseñada para subir por medio de escaleras eléctricas.

La andadera no tiene materiales retardantes a la flama.

El peso máximo que soporta la andadera es de 136 kg [300 libras].

La capacidad de carga máxima de la bolsa porta objetos es de 5 kg [11 libras]. La andadera no está diseñada para cargar cosas u otras funciones que no sean el propósito de ayudar a una persona a moverse.

La bolsa portaobjetos no es adecuada para transportar animales.

Puede plegar la andadera para ahorrar espacio. Tenga en cuenta que existe el riesgo al plegar o desplegar la andadera, si no presta atención puede atraparse los dedos o la ropa. No tire de las piezas adjuntas (frenos, ruedas, canasta, etc.) mientras pliega o despliega el andador con ruedas, use de apoyo el marco u otras partes para hacer esta acción. Tenga en cuenta que las partes del asiento pueden llegar a calentarse si se le expone a la luz del sol por mucho tiempo y podrían causar lesiones al contacto con la piel. Por lo tanto, cubra estas partes o proteja la andadera de los rayos solares.

7.-LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Limpieza

Puede limpiar con un paño húmedo la parte del marco. Para suciedad más difícil, se puede usar un agente de limpieza suave.

Las ruedas se pueden limpiar con un cepillo húmedo con cerdas suaves de plástico (¡no use cepillos de alambre!)

El respaldo, el asiento y la bolsa de transporte se pueden lavar con un jabón suave.

Desinfección

La andadera se puede desinfectar con un desinfectante doméstico. Use un desinfectante en aerosol a base de alcohol aprobado o un desinfectante de toallitas.

Permita que la andadera se seque al aire libre.

8. REUTILIZACIÓN

Si usted va a darle la andadera a otra persona debe limpiarla y desinfectarla inicialmente. No olvide entregarla con todos los documentos técnicos necesarios al nuevo usuario para un manejo seguro. La andadera debe ser inspeccionada por un especialista autorizado y transferido en condiciones adecuadas.

9.-DATOS TECNICOS

TAMAÑO Y PESO	
Ancho del asiento	460 mm
Altura del asiento	540 mm
Ancho total (ajustable a 6 niveles)	795 - 920 mm
Peso sin accesorios	8 kg
Capacidad de carga	136 kg
Capacidad portaobjetos	5 kg
Tamaño plegada	706x250x810 mm (L x B x H)
RUEDAS	
Ruedas delanteras	250 x 35 mm
Ruedas traseras	210 x 35 mm
Radio de giro	1770 mm
MATERIALES	
Marco	Aluminio (Protección de corrosión)
Asiento	Nylon negro
Respaldo	Nylon negro
Llanta	Poliuretano

CONDICIONES DE OPERACIÓN	
Temperatura	0 - 50 °C
Humedad	20 - 80 %
CONDICIONES DE GUARDADO	
Temperatura	-20bis + 60 °C
Humedad	45 - 60 %

10. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se recomienda que la andadera se someta a una inspecciones periódicas. En caso de fallas o defectos, la andadera se debe llamar inmediatamente al Distribuidor Autorizado ReActiv para su reparación.



Si es necesario pregunte al Distribuidor Autorizado si hay refacciones de reemplazo disponibles

Ponga a disposición del Distribuidor Autorizado la información y los documentos necesarios para su reparación y mantenimiento.

GENERAL	Comentarios
La andadera se abre facilmente	
La andadera no da vuelta	
Los frenos no están sueltos	
FRENOS	
Las llantas no tocan el suelo	
Los frenos se atorán fácilmente	
Los frenos no funcionan	
ASIENTO	
El asiento no está suelto	
RUEDAS	
No se mueven lateralmente	
No tienen grietas en la superficie	
Respaldo	
La cuebierta no está dañada	
El respaldo está bien sujeto	

11. Garantía

Existe una garantía limitada de doce meses a partir de la fecha de entrega de su andadera. La garantía cubre reparaciones o reemplazo durante este período, esta garantía no es transferible. Si alguna parte del producto requiere reparación o reemplazo completo como resultado de un defecto de fabricación o material dentro del período de garantía, las partes se suministrarán sin cargo. La garantía excluye las llantas y todos los artículos que hayan sido sometidos a un uso indebido según a las recomendaciones del manual de usuario. En circunstancias normales, no se asumirá ninguna responsabilidad cuando el producto no se haya mantenido de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Las condiciones de garantía anteriores solo se aplican a productos nuevos.



ReActivMxOficial



www.reactiv.mx